

# Stress-Fri Sonde fodring



FLEXI TUBER START KIT

NEW  
PRODUCT

## Gennemtænkt design - nem at bruge!

Sonderne er udformet af dyrlæge og reducerer i høj grad kalvens stres og utilpashed. Den flexible sonde er nem at sluge- kalvens kamp og modstand reduceres, Anvendelsen er nem at lære.

Flexi Tube kan holdes med kun én hand. Indeholder Velco strips til mere "håndfri" betjening.


Stor 4 liters flaske

Transparent sonde gør det nemt af følge indgivning – samt nem rengøring

Ergonomisk håndtag –perfekt til både små og store hænder

Selv tykflydende Kolostrum løber hurtigt

NYT!  
Gennemtænkt  
system!

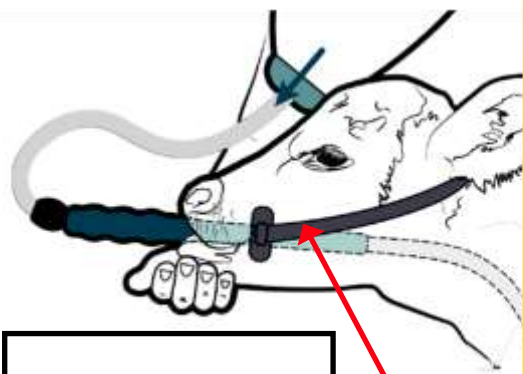

Safety tip



Størrelses markering gør dosering nem

4 L



Mundstykke-  
Velcobånd  
Sættes  
bag ørerne

Tube føres ind gennem  
mundstykket, så den nemt  
føres ned i spiserøret



Clip on flaske holder  
mundstykke rent.

Click on sut  
sikrer  
forbindelse til flaske og  
sonde.



Erri-Comfort A/S  
tlf 97132382 - info@erricomfort.dk

DAVIESWAY  
IDEAS TO FARM. EVERYDAY.

# Hvordan bruges Flexi tube?

2



Før tuben gennem mundstykket og ned i spiserøret

Spiserør

3



Stopper og kalvevægt viser dosering

Når sonden er gået ind i spiserøret, er det tid at hæve flasken

1



Mundstykket sidder behageligt i munden fæstnet med bånd bag ørerne.

## REGEL NUMMER ET

Lad aldrig væsken løbe før sonden sidder korrekt

### Under indgift:

Hold mundstykket på plads, mens der fodres. Hold kaven sådan, at hvis den bevæger sig bevæger mundstykket sig MED kalven. Lad ikke sonden bevæge sig mere end 2.5 cm ud under indgivningen. Lad aldrig kalven sænke hovedet til under maven niveau.

Udtagning af sonden:  
Vent til mindst 1 sekund efter at væsken er løbet ud af sonden, træk så forsigtigt sonden ud

4



## STOPPER POSITION & MAKERING FOR STØRRELSE:

- Overvej omhyggeligt kalvens vægt - anslå den hellere lidt for højt, sonden må hellere føres for langt ned.
- Stop mærkning skal sættes til højre for mærket!

Undervurder ikke kalvens størrelse, det er bedre at føre tuben længere ned – end ikke langt nok!


Vi anbefaler, at stopper mærkningen sættes efter den største kalv i gruppen



Se venligst demonstrations video



**FLEXI  
TUBER**

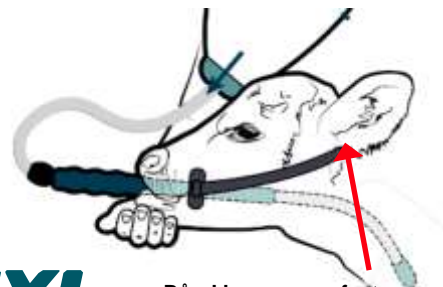

Bånd bag ørerne fastgør mundstykket behageligt i munden.

Voddervej 1, 6780 Skærbæk

Tlf. 97132382

[info@erricomfort.dk](mailto:info@erricomfort.dk), [www.erricomfort.dk](http://www.erricomfort.dk)

**Erri-Comfort A/S**